

Medtronic

La potencia importa.

Plataforma energética Valleylab™
FT10 para dispositivos
de ablación quirúrgica
Cardioblate™ y otros

Valleylab™ FT10
Plataforma electroquirúrgica para
o sistema Cardioblate™ IRF.

Cardioblate™ BP2
pinza bipolar RF irrigada

Cardioblate™
Pluma monopolar XL






Cardioblate™ LP
pinza bipolar RF
irrigada

Cardioblate™ BP2
pinza bipolar RF
irrigada

La eficiencia importa más que nunca

Una solución versátil de energía RF que hace sentido, ya sea en el quirófano de cirugía cardiovascular o en todo el hospital.

La plataforma energética Valleylab FT10 es una solución de energía de RF todo en uno, proyectada para uso con los dispositivos de ablación quirúrgica Cardioblate.

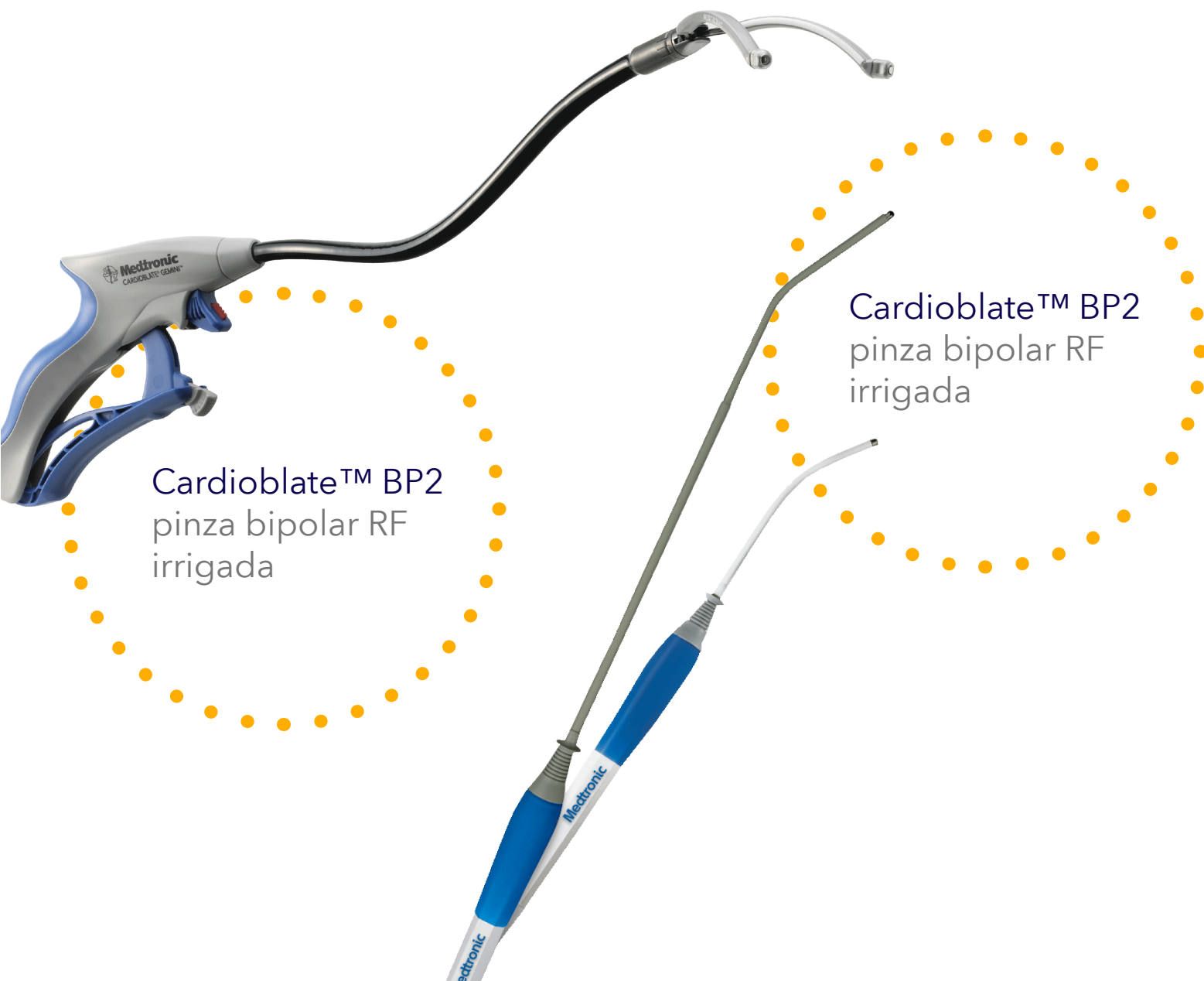

Feedback y potencia en tiempo real

La plataforma energética Valleylab FT10 proporciona la energía personalizada necesaria para una transmuralidad reproducible y altamente confiable, proporcionando energía de radiofrecuencia (IRF) irrigada y precisa de acuerdo con los requisitos de tejido.[†]

[†]Con base en datos de referencia archivados en Medtronic.

Fácil, versátil y eficiente.

La plataforma energética Valleylab FT10 ofrece uso intuitivo al personal del quirófano. Conecte los dispositivos de ablación quirúrgica bipolar y monopolar Cardioblade en combinación con el dispositivo electro quirúrgico Medtronic de su elección.

†Con base en datos de referencia archivados en Medtronic.



Dispositivos conectados:

Pinza bipolar
Cardioblade LP IRF

Lápiz electro quirúrgico
con electrodo revestido

Pluma monopolar
Cardioblade XL

- Diseño con tamaño reducido.†
- La pantalla LCD a color proporciona gráficos en tiempo real.
- Los controles de la pantalla táctil facilitan la configuración y el ajuste de los parámetros de ablación. El modo monopolar monitorea y controla la entrega de energía RF con un nivel preseleccionado.
- El modo bipolar monitorea automáticamente la impedancia del tejido, regula la entrega de energía RF y proporciona confirmación de la transmuralidad.
- Planes de servicio y soporte para equipos disponibles en todo el mundo.

†El funcionamiento no exige el uso de varios generadores.

Información de pedidos.

Producto	Código de catálogo	Cantidad	Uso
Plataforma energética Valleylab™ FT10†	VLFT10GEN	1 unidad	Reutilizable
Carrito Valleylab™ FT10	VLFTCRT	1 unidad	Reutilizable
Interruptor de pedal LigaSure™ púrpura‡	LS0300	1 unidad	Reutilizable
Dispositivo de ablación quirúrgica Cardioblate™ BP2	49321	1 unidad	Uso único
Dispositivo de ablación quirúrgica Cardioblate™ LP	49341	1 unidad	Uso único
Pluma de ablación quirúrgica Cardioblate™‡	49313	1 unidad	Uso único
Pluma de ablación quirúrgica Cardioblate™ XL‡	49314	1 unidad	Uso único

†El interruptor de pedal de pedal LigaSure púrpura es necesario para el funcionamiento de ValleyLab FT10 con dispositivos Cardioblate.

‡ Es necesario un electrodo REM para adultos, cable modelo E7507 (9 pies) o cable E7507DB (15 pies) para usar con la pluma de ablación quirúrgica Cardioblate, Modelo 49313, y la pluma XL, Modelo 49314. Son necesarios una bolsa de presión, conjunto de mangueras para IV y solución salina normal disponibles en el mercado para uso con todos los dispositivos Cardioblate.

Contenido sólo para los profesionales de la salud.

Importante: Consulte los materiales presentes en el paquete del producto para conocer instrucciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

Compruebe la disponibilidad y la configuración del producto en su región con nuestros representantes de venta.

© 2022 Medtronic. Reservados todos los derechos. Medtronic, el logo de Medtronic y Otros, son en conjunto, marcas registradas de Medtronic. Todas las demás marcas son marcas registradas de una compañía Medtronic. Covidien es una compañía que forma parte del grupo Medtronic.

Medtronic