



EMODIAL

Medtronic

distributeur exclusif au Canada

SOVAN[®]

Pansement pour fistule



EMODIAL

Via Finati, 4/A - Ferrara (ITALIE)

Téléphone : (+39) 0532 978198 - Télécopieur : (+39) 0532 978414

www.emodial.it - info@emodial.it



REV. 03/2019



Description :

Tampon très absorbant sur un adhésif respirant hypoallergénique.

Indications :

Hémostase par compression, à utiliser spécifiquement pour les soins d'accès artérioveineux après le retrait des aiguilles à fistule. Convient également aux patients qui ont besoin de traitements intraveineux et de transfusions sanguines.

Application :

Conçu pour arrêter les saignements et réduire le risque d'hémorragie, grâce à la compression sur les points d'insertion, et pour agir comme barrière contre les risques d'infection. La couche biocompatible non adhésive du tampon ne colle pas à la peau, **ce qui prévient le retrait de caillots et le risque de saignement**. L'adhésif aide à maintenir le tampon en place.



Mode d'emploi

1 Retirez la pellicule protectrice et fixez la première moitié du pansement à la peau.



2 Placez le tampon sur le point d'insertion, appuyez sur le tampon et retirez l'aiguille.



3 Retirez la deuxième moitié de la pellicule et fixez la deuxième moitié du pansement à la peau. Maintenez le tout en place jusqu'à ce que l'hémostase soit obtenue.



RÉFÉRENCES Les données et les caractéristiques techniques peuvent changer sans préavis

CODE	PANSEMENT cm	TAMPON cm	Qté/ emb.	Emb./ boîte
S0079-1	10 x 5	ø 2,6	1	700

Classification :
Biocompatible :
Stérilisation :
Expiration :

Instrument médical de classe I
Conformément à la norme UNI EN ISO 10993
Rayons gamma
5 ans
Usage unique

