



EMODIAL

**Medtronic**

distributeur exclusif au Canada

**EMOSTAN<sup>®</sup>**

Tampon pour fistule



EMODIAL

Via Finati, 4/A - Ferrara (ITALIE)

Téléphone : (+39) 0532 978198 - Télécopieur : (+39) 0532 978414

[www.emodial.it](http://www.emodial.it) - [info@emodial.it](mailto:info@emodial.it)



REV. 11/2018

**Description :**

Tampon très absorbant.

**Indications :**

Hémostase par compression, à utiliser spécifiquement pour les soins d'accès artérioveineux après le retrait des aiguilles à fistule. Convient également aux patients qui ont besoin de traitements intraveineux et de transfusions sanguines.

**Application :**

Conçu pour arrêter les saignements et réduire le risque d'hémorragie, grâce à la compression sur les points d'insertion, et pour agir comme barrière contre les risques d'infection. La couche biocompatible non adhésive du tampon ne colle pas à la peau, **ce qui prévient le retrait de caillots et le risque de saignement.**



**Mode d'emploi**

**1** Placez le tampon sur le point d'insertion et maintenez-le en place avec le doigt.



**2** Retirez l'aiguille et appuyez sur le tampon assez longtemps pour arrêter le saignement.



RÉFÉRENCES Les données et les caractéristiques techniques peuvent changer sans préavis

| CODE    | DIMENSION DU TAMPON cm | ÉPAISSEUR DU TAMPON cm | Qté/ emb. | Emb./ boîte |
|---------|------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| S0210-1 | ø 2,6                  | 0,8 ± 0,1              | 1         | 700         |
| S0211-1 | ø 3,5                  | 0,8 ± 0,1              | 1         | 700         |
| S0212-1 | 3,5 x 4,5              | 0,8 ± 0,1              | 1         | 500         |

**Classification :** Instrument médical de classe I  
**Biocompatible :** Conformément à la norme UNI EN ISO 10993  
**Stérilisation :** Rayons gamma  
**Expiration :** 5 ans  
Usage unique

