



**EMODIAL**

**Medtronic**

distributeur exclusif au Canada

**BETAFIX<sup>®</sup>**

Bandage pour fistule



**EMODIAL**

Via Finati, 4/A - Ferrara (ITALIE)

Téléphone : (+39) 0532 978198 - Télécopieur : (+39) 0532 978414

[www.emodial.it](http://www.emodial.it) - [info@emodial.it](mailto:info@emodial.it)



REV. 03/2019



### Description :

Bandage élastique pour fistule muni d'un tampon deux épaisseurs très absorbant et d'un adhésif pour une meilleure étanchéité.

### Indications :

Hémostase par compression, à utiliser spécifiquement pour les soins d'accès artérioveineux après le retrait des aiguilles à fistule. Convient également aux patients qui ont besoin de traitements intraveineux et de transfusions sanguines.

### Application :

Conçu pour arrêter les saignements et réduire le risque d'hémorragie, grâce à la compression sur les points d'insertion, et pour agir comme barrière contre les risques d'infection. La couche biocompatible non adhésive du tampon ne colle pas à la peau, **ce qui prévient le retrait de caillots et le risque de saignement**. L'adhésif aide à maintenir le tampon en place. Le bandage en coton prévient la sensibilisation causée par la colle de la partie adhésive.



### Mode d'emploi

1 Déroulez la portion du bandage muni du tampon.



2 Placez le tampon sur le point d'insertion.



3 Serrez le bandage suffisamment pour arrêter le saignement.



4 Retirez la pellicule protectrice et fixez le bandage avec l'adhésif.



RÉFÉRENCES Les données et les caractéristiques techniques peuvent changer sans préavis

CODE	LONGUEUR du bandage cm	LARGEUR du bandage cm	TAMPON cm	Qté/ emb.	Emb/ boîte
S0029-1	50 ± 10 %	6	ø 2.6	1	500

Classification :  
Biocompatible :  
Stérilisation :  
Expiration :

Instrument médical de classe I  
**Conformément à la norme** UNI EN ISO 10993  
Rayons gamma  
5 ans  
Usage unique

